

Zusammenbau Gelenksupport // Assembly joint support

1. Stecken Sie die Knebelschraube (1) durch den Gesichtsbogen-Arm.
Insert the toggle screw (1) through the facebow arm.
2. Drehen Sie die Knebelschraube (1) so, dass Sie den Passstift (2) in die Nut einsetzen können.
Turn the toggle screw (1) to insert the dowel pin (2) into the slot.
3. Fädeln Sie den Bissgabel-Arm (3) auf die emporstehende Knebelschraube (1).
Thread the bite fork arm (3) onto the upstanding toggle screw (1).
4. Fädeln Sie die Tellerfeder/Unterlegscheibe (4) über die Knebelschraube (1).
Thread the disc spring / washer (4) over the thumbscrew (1).
5. Schrauben Sie die Arretierungsschraube (5) auf die Knebelschraube (1).
Screw the locking screw (5) onto the toggle screw (1).

